



FICHA TECNICA

SUPER HDQ NEUTRAL

Desinfectante para dispositivos medicos

Propiedades:

Super HDQ Neutral es un desinfectante y desodorizante en un solo paso, para uso hospitalario e institucional. Es un producto diseñado para limpieza general y desinfección de dispositivos médicos.

Super HDQ Neutral es un excelente limpiador: Remueve fácilmente la suciedad, el moho, residuos de aceites corporales y otros tipos de contaminantes comúnmente encontrados en hospitales, asilos, clínicas veterinarias, y centros de estética.

Super HDQ Neutral no opaca el brillo de los pisos; adicionalmente proporciona un ahorro considerable de tiempo y reducción de costos al usuario ya que no requiere ser enjuagado cuando se aplica a las diluciones de uso recomendadas.

BENEFICIOS

- Higiene total en un solo paso: Remueve la suciedad, desinfecta y controla olores en una sola aplicación.
- Idóneo para ser usado en pisos con recubrimientos o acabados de alto brillo. Por ser un producto de pH neutro no daña el brillo ni la apariencia del recubrimiento.
- Ahorro de tiempo para el usuario. No requiere ser enjuagado después de la aplicación.
- Conserva su efectividad aun cuando se diluye en aguas con dureza hasta de 400 ppm.
- En la dilución de uso, proporciona 660 ppm de amonio cuaternario de alto desempeño microbicida.
- Elimina bacterias resistentes a los antibióticos.
- Dilución de uso 1:250 con agua, proporcionando un muy bajo costo en uso.

Super HDQ Neutral es un excelente desinfectante: Elimina las siguientes bacterias: Acinetobacter baumannii, Acinetobacter Iwoffi, Staphylococcus epidermidis resistente a los antibioticos, Bordetella bronchiseptica, Chlamydia psittaci, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), Micrococcus luteus, Pasturella multocida, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas cepacia, Salmonella enterica, Salmonella enterica serotipo pullorum, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Serratia marcescens, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus subespecie aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus mutans, Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli resistente a tetraciclina, Pseudomonas aeruginosa resistente a tetraciclina, Staphylococcus aureus resistente intermedio a vancomicina, Enterococcus faecalis resistente a vancomicina, Vibrio cholera, Yersinia enterocolitica.

Elimina los hongos: Aspergillus niger, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes.



FICHA TECNICA

SUPER HDQ NEUTRAL

Elimina los siguientes virus: Influenza aviar A(H3N2), Influenza aviar A(H5N1), Cytomegalovirus, Hepatitis B, Hepatitis C, Influenza A, Herpes simplex tipo 1, Virus sincicial respiratorio, Coronavirus humano, Herpes simplex tipo 2, Virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV 1), Virus de bronquitis infecciosa aviar Beaudette IB42, Coronavirus canino, Virus del moquillo canino, Virus gastroenteritis Transmisibile, Picornavirus felino, Vaccinia, virus de rinotraqueitis infecciosa bovina.

COMPOSICIÓN: Cada 100 cc de Super HDQ Neutral contienen 16 gramos de la mezcla de cloruros de dialquil dimetil amonio y alquil dimetil bencil amonio y 8 gramos de etilendiamino tetracetato de sodio.

Instrucciones de uso:

Desinfección y desodorización en un solo paso: Use Super HDQ Neutral en una dilución de 1:250 con agua, esto es 4cc de producto por cada litro de agua. Aplique la solución diluida de Super HDQ Neutral sobre la superficie, permita un tiempo de acción de unos pocos segundos y frote para retirar la suciedad más adherida. Permita que la superficie permanezca humedecida por 10 minutos para lograr una desinfección completa. Luego seque la superficie con un paño limpio y seco o deje secar libremente.

Especificaciones técnicas:

Aspecto:	Líquido verde azul no viscoso.
Olor:	Característico de los amonios cuaternarios
Densidad:	1.01 -1.03 g/ml
pH (concentrado):	7.0 - 8.5
Ingrediente Activo	160.000 ppm de Amonio Cuaternario de 5 ^a generación
Estabilidad en almacenamiento:	Mínimo 1 año
Contiene agentes detergentes biodegradables.	
Registro sanitario Invima : 2014DM-0014492	



FICHA TECNICA

SUPER HDQ NEUTRAL

Presentaciones:



Empaque: Super HDQ Neutral se comercializa en envases de polietileno de alta densidad en unidades de galón -6 por caja, bidón de 5

Garantía Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor en Sparcol. Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Spartan Colombia

Carrera 47 C N° 79 A Sur 15 – Sabaneta / Antioquia

PBX: (4) **604 58 00**

Carrera 32 N° 11 A 81 – Pensilvania / Bogotá

PBX: (1) **747 05 65**

www.spartancolombia.com

SPARCOL CHEMICALS & LIFE S.A.S.